


**Kit de transfert de graisse  
tout-en-un, stérile et  
à usage unique**

Procédure pour le kit Nanofill

## Kit Nanofill

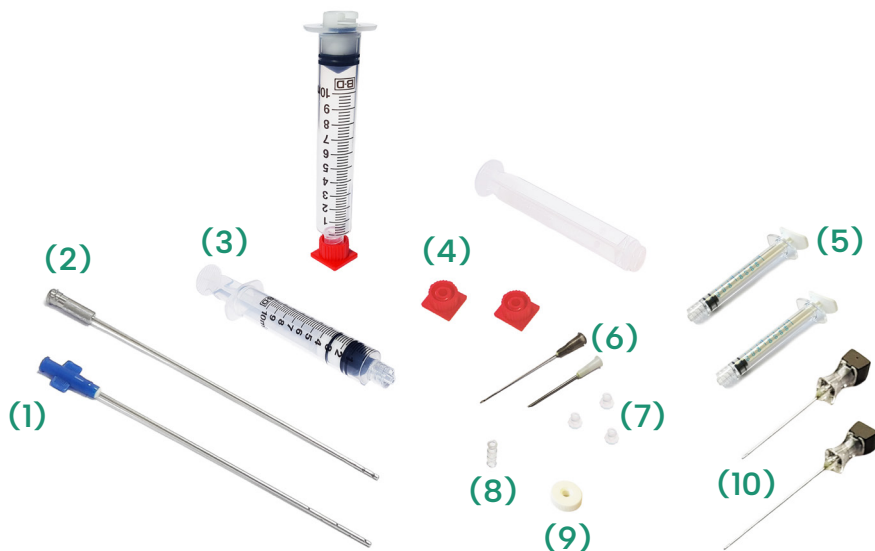

### Instruments

- (1) 1 canule d'infiltration  
( $\varnothing$  2.1 mm x L150 mm)
- (2) 1 canule de prélèvement  
4 trous ( $\varnothing$  1.1 mm)  
( $\varnothing$  1.7 - 2.1 mm x L150 mm)
- (3) 2 seringues Luer-Lock - 10 mL  
avec piston amovible
- (4) 3 capuchons de support pour seringues Luer-Lock  
(rouge)
- (5) 2 seringues Luer-Lock - 1 mL
- (6) 2 aiguilles  
16G, L40 mm  
22G, L50 mm
- (7) 3 capuchons pour seringues Luer-Lock  
(transparents)
- (8) 1 connecteur FLL-FLL
- (9) 1 écrou de rotor
- (10) 2 canules d'injection - 22G  
( $\varnothing$  0.5 - 0.7 mm x L50 mm)  
( $\varnothing$  0.5 - 0.7 mm x L70 mm)

### Produits associés

Nous recommandons une centrifugation douce et courte pour une meilleure survie des cellules adipeuses.

Notre centrifugeuse est compatible avec tous nos kits grâce à ses différents rotors.



### Adip'Spin Centrifugeuse préprogrammée

Pour changer de programme, appuyez sur la touche OPEN pendant 8 secondes.



### Rotor R12

Rotor R12, avec les adaptateurs, compatible avec le Nanofill.

## ÉTAPE 1

Infiltrer la solution tumescente

- solution saline,
- adrénaline,
- anesthésie locale.



## ÉTAPE 2

Prélever le tissu adipeux par tranches de **2 mL** (x2 seringues).



## ÉTAPE 3

Placer la seringue en position verticale sur le bouchon rouge.



## ÉTAPE 4

Décantation – Attendez que le tissu adipeux et la solution saline se séparent.



## ÉTAPE 5

Retirer le bouchon rouge, maintenir la seringue en position verticale, expulser le subnatant (éliminer l'air – la seringue est tournée à l'envers).



## ÉTAPE 6

Aspirer de la solution saline dans la seringue **jusqu'à ce que vous voyiez le haut du piston au-dessus des brides des doigts.**




## ÉTAPE 7

Lavage – Mettre le bouchon transparent sur la seringue. Retirer le piston et mélanger délicatement la solution saline et le tissu adipeux (3 fois).



## ÉTAPE 8

Placer les deux seringues (remplies jusqu'en haut – pas d'air) dans la centrifugeuse (inserts blancs l'un en face de l'autre). Fermez le couvercle de la centrifugeuse.

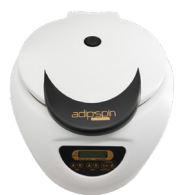

## ÉTAPE 9

Vérifier que la centrifugeuse est sur le programme «FAT» et appuyer sur «RUN».



## ÉTAPE 10

Sorter les seringues (une à la fois), tenez-les debout, mettez le piston, enlevez le capuchon, expulsez la solution saline.



## ÉTAPE 11

Répéter les étapes 5 à 9 **deux fois**.

## ÉTAPE 12

Placer les seringues sur les bouchons rouges (en position verticale), mettre les pistons.



## ÉTAPE 13

Expulser une dernière fois la solution saline.



## ÉTAPE 14

Connecter le connecteur Luer-Lock à la seringue de 10 mL, l'amorcer et la transférer dans la seringue de 1 mL.



## ÉTAPE 15

Injecter.





**Kit de transfert de graisse  
tout-en-un, stérile et  
à usage unique**

Procédure pour le kit Nanofill

[commercial@stemcis.com](mailto:commercial@stemcis.com)

[www.stemcis.com](http://www.stemcis.com)

Stemcis